

Il y a une vie derrière chaque test

Dépistage simple du **VRS** pour les personnes à
risque élevé

Le portatif et facile à utiliser système **BD Veritor™ Plus**
fournit des résultats fiables pour le VRS en **10 minutes**.



Soyez prêt pour les maladies respiratoires

VRS

Lorsque vos patients pédiatriques† ont besoin d'un test rapide et fiable du VRS, consultez le **système BD Veritor™ Plus**. Offrant des résultats fiables au point d'intervention grâce à un instrument portatif simple à utiliser.



Simplifie le processus de test

- Utilisation facile et fonctionnalité à bouton unique qui peuvent aider à réduire les erreurs manuelles potentielles
- Procure un traitement intuitif des échantillons grâce à des tubes préremplis et homogènes



Assure l'efficacité du flux de travail

- S'adapte facilement à votre flux de travail en offrant 2 modes d'utilisation
 - » **Walk Away**: l'appareil de test est inséré dans l'analyseur immédiatement après la préparation, ce qui permet au personnel de réaliser plusieurs tâches à la fois pendant que l'échantillon est incubé
 - » **Analysez Maintenant** : le dispositif d'analyse est inséré une fois le temps d'incubation terminé, permettant d'analyser différents lots d'échantillons en même temps
- Possibilité de tester le même échantillon avec un dispositif de test BD Veritor™ Flu A+B.¹



Obtient des résultats fiables et rapides

- Affiche des résultats numériques faciles à lire pour le VRS en 10 minutes¹
- Fournit des résultats clairs et objectifs en corrigeant la liaison non spécifique et en détectant les résultats positifs non reconnus par l'œil spontané¹



Assure la traçabilité des résultats

- Dossiers d'analyse téléchargeables correspondant au numéro de lot de la trousse, à l'opérateur, au numéro d'identification du patient ou de l'échantillon avec le module BD Veritor™ InfoWiFi ou via l'application complémentaire ImageMover
- Offre des capacités d'impression des résultats grâce au port USB

¹La trousse BD Veritor™ RSV au point d'intervention est indiquée pour les patients âgés de moins de 6 ans. †La trousse BD Veritor™ RSV au point d'intervention est indiquée pour les patients âgés de moins de 20 ans.

Référence: 1. Système BD Veritor™ pour la détection rapide du virus respiratoire syncytial (VRS), notice du produit, 8086098. Franklin Lakes, NJ : Becton, Dickinson and Company

BD Life Sciences, 2100 Derry Road ouest, Mississauga, ON L5N 0B3 CA
866-979-9408

BDVeritor.com

BD, le logo BD et Veritor sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. © 2021 BD. Tous droits réservés.

Offre un rendement éprouvé (trousse au point de service)

	PAP [†]	NPA [‡]	Résultats en
Comparé à la culture virale	91,8 % (95% CI: 85,9 %, 95,4 %)	93,3 % (95% CI: 90,4 %, 94,4 %)	10
Comparé à la méthode PCR	81,6 % (95% CI: 75,2 %, 86,6 %)	99,1 % (95% CI: 97,5%, 99,7 %)	10

[†]pourcentage de concordance positive
[‡]pourcentage de concordance négative

Information pour la commande	No de cat	Qté
Trousse pour le dépistage du VRS BD Veritor™ Plus	256038	30 tests
Trousse de laboratoire pour le dépistage du VRS BD Veritor™ Plus	256042	30 tests
Analyseur BD Veritor™ Plus	256066	1 unité

* Système pour la détection rapide du SARS-COV-2 BD Veritor™

- La vente de ce test a été autorisée au Canada par Santé Canada en vertu d'une ordonnance provisoire.
- Ce test n'est autorisé que pour la durée de l'ordonnance provisoire concernant l'importation et la vente de dispositifs médicaux à utiliser en lien avec la COVID-19, à moins que l'autorisation ne soit résiliée ou révoquée plus tôt.
- Ce test a été autorisé uniquement pour la détection des protéines du SARS-CoV-2, et non pour d'autres virus ou agents pathogènes.

